

HemoCue® Hb 201+ System



Standarden för optimal noggrannhet

Hb 201+

Med resultat av laboratorie kvalitet och enkelt handhavande har HemoCue® Hb 201+ System blivit en standard för patientnära Hb-testning. Vårdgivare runt om i världen erhåller pålitliga resultat och svar direkt, vilket gör att de kan fatta rätt beslut när det behövs som mest - patientnära.

HemoCue har mer än 40 års erfarenhet av hängiven support och service samt unika utbildningar, vilket gör att du alltid kan räkna med att HemoCue har de rätta lösningarna för alla dina behov.

Lita på dina patientnära resultat

- Fabrikskalibrerad mot ICSH referensmetod
- Mikrokuvett-teknologi med utmärkt lot-till-lot reproducerbarhet
- Möjlighet att lagra upp till 600 resultat med datum och tid
- Blodbaserad vätskekontroll finns tillgänglig

Enkel tillgång till noggrannhet med laboratorie kvalitet

- Kapillära, venösa eller arteriella helblodsprover
- Enkel att använda
- Minimalt underhåll av systemet
- Elektronisk överföring av testresultat till journalsystem/LIS

HemoCue® Hb 201+ System

Specifikationer

Princip

En modifierad azidmethemoglobin-reaktion, två våglängder (570 nm och 880 nm) för att kompensera för turbiditet

Kalibrering

Fabrikskalibrerad mot ICSH referensmetod, ingen ytterligare kalibrering krävs

Provmaterial

Kapillära, venösa eller arteriella helblodsprover

Mätområde

5-256 g/L

Mättid

Resultat inom 60 sekunder

Provvoly

~10 µL

Mått

160×85×43 mm

Vikt

350 g inklusive batterier

Förvaringstemperatur

Instrument: 0-50 °C

Mikrokuvetter: öppnad 15-30 °C

Arbetstemperatur

15-30 °C

Strömförsörjning


Nätadapter eller 4 AA-batterier

Connectivity/uppkoppling


Skrivare och HemoCue® Basic Connect, inklusive valfri streckkodsläsare. Dataöverföring med Bluetooth® är möjlig via HemoCue® BT Connect (tillbehör)

Kvalitetskontroll


Inbyggd självtest. Blodbaserad vätskekontroll finns tillgänglig (bovint)

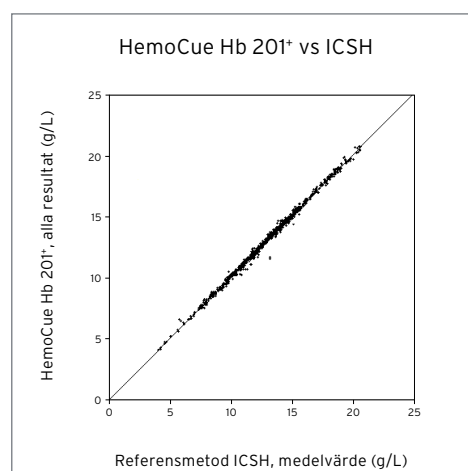

Tre enkla steg

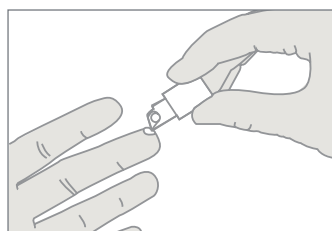

1 Fyll mikrokuvetten

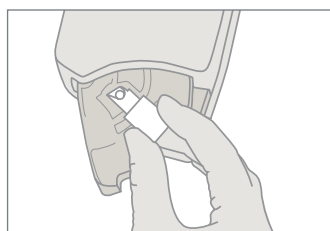

2 Placera mikrokuvetten i instrumentet



3 Läs av resultatet